

## برامج الضخ بمضخة الثدي Symphony تعليمات البدء السريعة

مضخة الثدي Symphony تتضمن برنامجي ضخ:

**البرنامج INITIATE** يدعم الأمهات المعتمدات على المضخات لبدء إنتاج لبن إدرار لبن الأم. ويحاكي البرنامج النمط الأسرع وغير المنتظم من الامتصاص والتوقف المؤقت لمولود \_ استكمل فترة حمله \_ في الأيام الأولى من إفراز لبن الأم.

**البرنامج MAINTAIN** مصمّم لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة من إنتاج لبن الأم بعد حدوث تنشيط الإفراز (لبن الأم الناتج)؛ من أجل تنمية إدرار وافي من لبن الأم، والمحافظة عليه. وهذا البرنامج بفضل تزويده بتقنية 2-Phase Expression يحاكي نمط الامتصاص لمولود \_ استكمل فترة حمله \_ أثناء الإفراز الثابت للبن الأم.

يوصى بالضخ المزدوج؛ لأنه قد يساعد في زيادة إدرار لبن الأم والمحافظة عليه.

مضخة الثدي Symphony يفضل تزويدها ببرامج الضخ المستندة إلى الأبحاث، طوّرت خصيصًا لدعم الأمهات على مدى رحلتين مع إفراز لبن الأم؛ من أجل بدء إدرار وافي من لبن الأم، وتنميته، والمحافظة عليه.



## برامج الضخ بمضخة الثدي Symphony تعليمات البدء السريعة

مضخة الثدي Symphony تتضمن برنامجي ضخ:


**البرنامج INITIATE** يدعم الأمهات المعتمدات على المضخات لبدء إنتاج لبن إدرار لبن الأم. ويحاكي البرنامج النمط الأسرع وغير المنتظم من الامتصاص والتوقف المؤقت لمولود \_ استكمل فترة حمله \_ في الأيام الأولى من إفراز لبن الأم.

**البرنامج MAINTAIN** مصمّم لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة من إنتاج لبن الأم بعد حدوث تنشيط الإفراز (لبن الأم الناتج)؛ من أجل تنمية إدرار وافي من لبن الأم، والمحافظة عليه. وهذا البرنامج بفضل تزويده بتقنية 2-Phase Expression يحاكي نمط الامتصاص لمولود \_ استكمل فترة حمله \_ أثناء الإفراز الثابت للبن الأم.

يوصى بالضخ المزدوج؛ لأنه قد يساعد في زيادة إدرار لبن الأم والمحافظة عليه.

مضخة الثدي Symphony يفضل تزويدها ببرامج الضخ المستندة إلى الأبحاث، طوّرت خصيصًا لدعم الأمهات على مدى رحلتين مع إفراز لبن الأم؛ من أجل بدء إدرار وافي من لبن الأم، وتنميته، والمحافظة عليه.



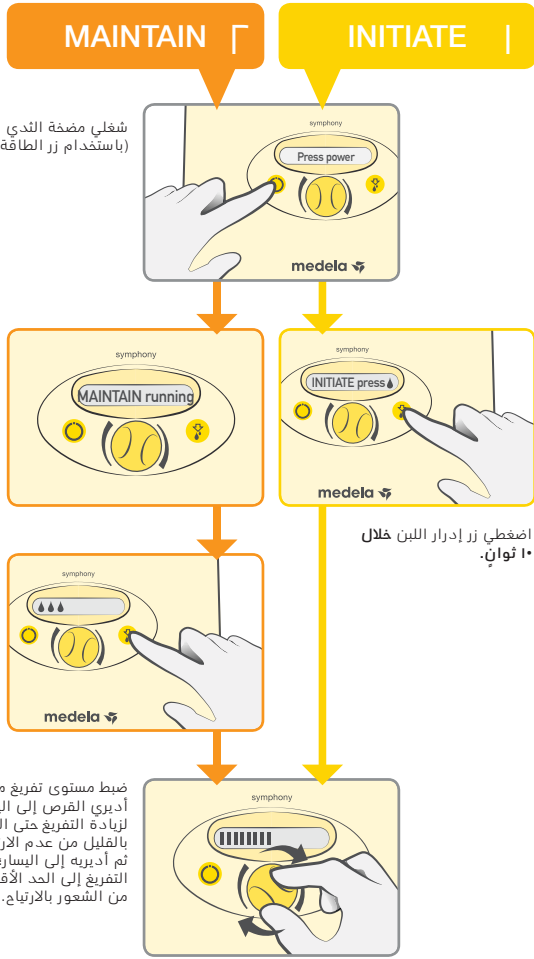

### البرنامج INITIATE

استخدمي البرنامج INITIATE بعد الولادة مباشرة:

إلى أن تضخي إجمالي ما لا يقل عن ٢٠ ملليلترًا في كل واحدة من جلسات الضخ الثلاثة الأخيرة، أو أعلى مدار الأيام الخمسة الأولى. وإذا لم يحدث تنشيط الإفراز بعد خمسة أيام، فحوّلي إلى البرنامج MAINTAIN.

يعمل البرنامج INITIATE تلقائيًا لمدة ١٥ دقيقة، مع مرات توقف مؤقتة متعددة. ومن المهم استكمال البرنامج بالكامل. في نهاية البرنامج ستعرض شاشة العرض الرسالة "Program complete" (البرنامج اكتمل). ويتوقف تشغيل المضخة تلقائيًا.

### البرنامج MAINTAIN

استخدمي البرنامج MAINTAIN بعد تنشيط الإفراز:


إرثما تضخي إجمالي ما لا يقل عن ٢٠ ملليلترًا في كل واحدة من جلسات الضخ الثلاثة الأخيرة، أو في بداية اليوم السادس، أيها أسبق.

استمري في الضخ حتى تشعر بيونة الثدي وإفراغه جيدًا بالكامل (توصي Medela بفترة ضخ لا تقل عن ١٥ دقيقة). ويجب إيقاف تشغيل برنامج الضخ يدويًا. واطلبي النص من استشاري إفراز لبن الأم والرضاعة الطبيعية أو القابلة لمزيد من المعلومات.

ملحوظة: لا تحمل التعليمات السريعة هذه محل تعليمات الاستخدام العادية. يُرجى الرجوع إلى تعليمات استخدام مضخة الثدي Symphony لمزيد من المعلومات التفصيلية.

Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com  
This publication is not intended for distribution in the USA.

Netherlands & Belgium: Medela Benelux BV, Uilenwaard 31, 5236 WB 's-Hertogenbosch, Netherlands  
Phone +31 73 690 40 40, Fax +31 73 690 40 44, info@medela.nl / info@medela.be, www.medela.nl / www.medela.be

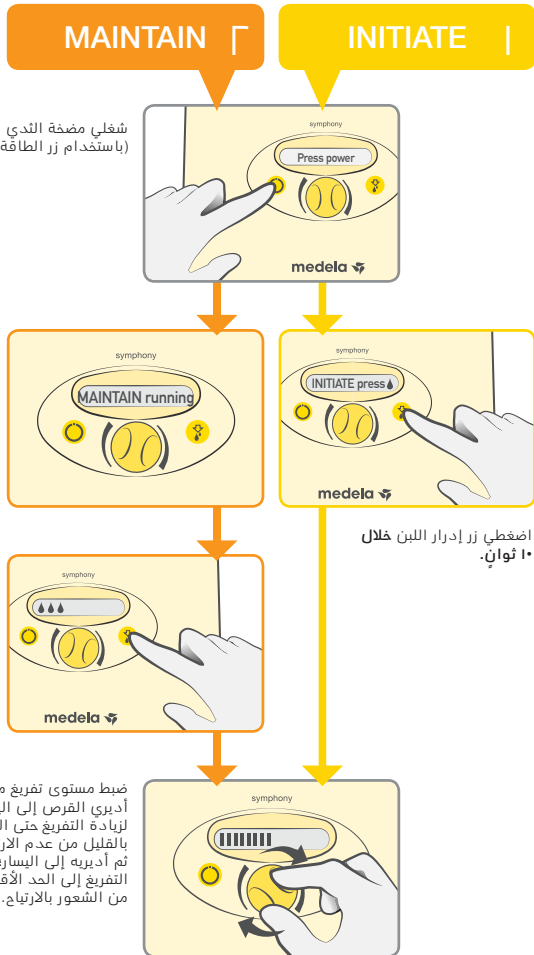

### البرنامج INITIATE

استخدمي البرنامج INITIATE بعد الولادة مباشرة:

إلى أن تضخي إجمالي ما لا يقل عن ٢٠ ملليلترًا في كل واحدة من جلسات الضخ الثلاثة الأخيرة، أو أعلى مدار الأيام الخمسة الأولى. وإذا لم يحدث تنشيط الإفراز بعد خمسة أيام، فحوّلي إلى البرنامج MAINTAIN.

يعمل البرنامج INITIATE تلقائيًا لمدة ١٥ دقيقة، مع مرات توقف مؤقتة متعددة. ومن المهم استكمال البرنامج بالكامل. في نهاية البرنامج ستعرض شاشة العرض الرسالة "Program complete" (البرنامج اكتمل). ويتوقف تشغيل المضخة تلقائيًا.

### البرنامج MAINTAIN

استخدمي البرنامج MAINTAIN بعد تنشيط الإفراز:

إرثما تضخي إجمالي ما لا يقل عن ٢٠ ملليلترًا في كل واحدة من جلسات الضخ الثلاثة الأخيرة، أو في بداية اليوم السادس، أيها أسبق.

استمري في الضخ حتى تشعر بيونة الثدي وإفراغه جيدًا بالكامل (توصي Medela بفترة ضخ لا تقل عن ١٥ دقيقة). ويجب إيقاف تشغيل برنامج الضخ يدويًا. واطلبي النص من استشاري إفراز لبن الأم والرضاعة الطبيعية أو القابلة لمزيد من المعلومات.

ملحوظة: لا تحمل التعليمات السريعة هذه محل تعليمات الاستخدام العادية. يُرجى الرجوع إلى تعليمات استخدام مضخة الثدي Symphony لمزيد من المعلومات التفصيلية.

Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com  
This publication is not intended for distribution in the USA.

Netherlands & Belgium: Medela Benelux BV, Uilenwaard 31, 5236 WB 's-Hertogenbosch, Netherlands  
Phone +31 73 690 40 40, Fax +31 73 690 40 44, info@medela.nl / info@medela.be, www.medela.nl / www.medela.be